

Elbo 2.0 - Albueortose

ART.NO 20205

Elbo 2.0 brukes til postoperativ eller posttraumatisk stabilisering av arm og albue for å oppnå et kontrollert bevegelsesomfang eller immobilisering. Stopp i fleksjonsretning kan stilles i 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105° og 120°, og stopp i ekstensjonsretning kan stilles i 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75° og 90°. Lengden på over- og underarmsskinnene reguleres med ortosens teleskopmekanisme. Ortosens lengde kan varieres fra 37 til 46 cm. Ved behov for ekstra avlastning brukes skulderremmen. Elbo 2.0 er komfortabel og sitter godt rundt armen uten å skli ned.

Indikasjoner: Stabile brudd i albue, distal humerus, radius og proksimal ulna. Immobilisering etter operasjon på grunn av reparasjon av sener og leddbånd. Brukes til rehabilitering etter konservativ og kirurgisk behandling av albuebrudd. Albueluksasjon og sublaksasjon. Kroniske albueskader. Albuehyperekstensjon. Posttraumebehandling. **Kontraindikasjoner:** Ingen kjente.

Materiale: Skinne laget av lett aluminiumslegering. Ledd i polykarbonat. Termoplastiske deler med lengdejusterbare stropper. Varmelaminert polstring laget av dobbeltlags MTP. Inneholder ikke lateks.

Vaskeåid: Håndvask de polstrede delene i lunke vann med mild såpe; rens grundig. La tørke, unngikk direkte varme. Vask plastdelene med en svamp dyppet i lunke vann med mild såpe. Tørk med en klut. Ikke bruk blekemidler. Ikke renseri. Skal ikke strykes. Ikke tørketromles.

Tilbehør: Håndtak for nøytral posisjon, Elbo 2.0, Telescopic Hand support, bestilles separat:
- Venstre art.no.: 20205-15-50
- Høyre art.no.: 20205-25-50

Størrelse	Side	Art.no
Universal	Venstre	20205-10-50
Universal	Høyre	20205-20-50



Lengden på skinnene og leddets bevegelse er regulerbar og tilpasses individuelt til hver pasient.



Håndtak for nøytral posisjon, kan bestilles separat.

Ortosens lengde fra leddsenter	
Underarm	19 - 26 cm
Overarm	18 - 21 cm



MD Class I CE