

# HumerusComfort Collum - Armslynge

ART.NO 20225

HumerusComfort Collum er en armslynge som fikserer og avlaster skulderleddet. Skulderleddet posisjoneres i hvileposisjon for bruddleging og smertereduksjon.

**Indikasjoner:** Ikke-operativ behandling ved proksimal humerusfraktur. Abduksjon 30°, elevation 0-40°, intern rotasjon 0-20°.

**Materiale:** 45% Polyuretanskum, 30% Polyamid, 15% Polyester, 10% Bomull. Latexfri.

**Vaskeråd:** Maskinvask ved 40°C. Forsegl eller fjern borerlåser når du vasker. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel eller tøymykner siden dette kan svekke materialets funksjon. Ikke renses. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

**Størrelse:** Universell størrelse. Produktet leveres montert for høyre eller venstre arm.



Plasseres behagelig og enkelt arm/skulder i avlastet stilling, og gir smertelindring.



Størrelse	Art.no.
Universal venstre	20225-10-50
Universal høyre	20225-20-50


## Stillinger for maksimal avlastning av skulderleddet:



Abduksjon 30 grader.



Elevation 40 grader.

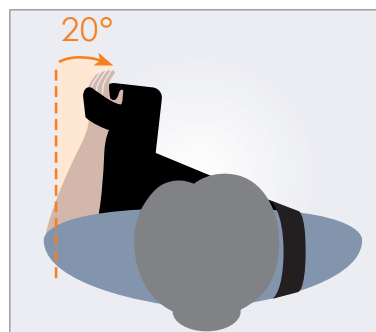

Intern rotasjon 20 grader.