

# Evelina - Bøyle-BH

ART.NO 31152

Bøyle-BH i mykt mikrofibermateriale. Stødige skåler, brede og justerbare skulderstropper. Lukkes med hekker i ryggen, 3x3 rader.

**Størrelse:** Evelina finnes i følgende størrelser: 65 D-G, 70 D-I, 75 D-I, 80 D-I, 85 D-G.

**Indikasjoner:** Postoperativ BH.

**Kontraindikasjoner:** Ingen kjente.

**Materiale:** Polyamid 90%, Elastan 10%. Latex free.

**Vaskeråd:** Vaskes ved 40°C, kan om nødvendig vaskes ved høyere temperaturer, opp til 60°C. Produktet holder lenger hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Tørkes hengende eller liggende. Ikke bruk tørketrommel. Lukk hekker før vask. Hvis man har fått blodflekker på plagget, bløtlegg eller vask i kaldt vann. Bruk ikke blekemiddel eller tøymykner da dette kan virke inn på funksjonen av materialet.

## Måltaking – slik måler du størrelse:

Les sammen med størrelsesguiden under.

1. Tiltett omkrets målt under bysten = **X**. Rund opp til nærmeste femtall (omkrets på 78 cm gir en BH størrelse på 80).
2. Løs omkrets målt fra sternum over høyeste punktet av bysten til midten av ryggraden = **Y**. Multipliser dette målet 2 = **Y2**
3. Forskjellen mellom **Y2** og **X** gir skål størrelsen (**Y2 - X = cup størrelse**).



Lukk med hekker i ryggen.  
Brede og justerbare skulderstropper.  
Bred støtte under armhulen.



## Størrelsesguide:

Omkrets under bysten = X						
Omkrets X cm	63-67	68-72	73-77	78-82	83-87	
= Størrelse	65	70	75	80	85	
Y2-X = Skål størrelse						
Forskjell (cm)	19	21	23	25	27	29
Skål størrelse	D	E	F	G	H	I

