

# Wrist-Thumb Embrace - Håndleddsartrose m. tommel

ART.NO 40321

Stabil kombinert tommel- og håndleddsartrose med skinner. Lukkes ved hjelp av tre borrelåsremmer som omgir håndleddet og gir ekstra stabil støtte. To avtagbare radielle tommelskinner er inkludert. Ortosen har en forhåndsbygd, formbar og avtagbar volar aluminiumsskinne og to dorosale plastskinner for ekstra stabilitet. Tommelgrepet er justerbart ved hjelp av to bånd som stabiliserer metacarpophalangeal-leddet og den proksimale falanxen.


- Indikasjoner:**
- Tommelbåndskader (forstuinger)
  - Akutt eller kronisk betennelse i håndleddet eller metakarpalbenet(artrose)
  - Senebetennelse og tenosynovitt i tommel og håndledd, og postoperativ immobilisering
  - Sekundær pleie etter bruddbehandling av tommelen eller basen av tommelen
  - Postoperativ immobilisering.

- Kontraindikasjoner:**
- Alvorlige forstuinger
  - Umiddelbar behandling etter brudd

**Material:** Polyester, Spandex, Polyamid, Nylon, Aluminium.

**Vaskeråd:** Håndvask anbefales, men produktet kan vaskes i 40°C maskinvask om nødvendig. Bruk vaskepose. Tørkes flatt. Fest borrelåstroppene og fjern skinnen før vask. Ikke bruk blekemiddel, klor eller tøyemykner da dette kan påvirke materialets funksjon. Ingen renseri. Må ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

**Mål:** Håndleddsmål i cm.

Størrelse	Håndledds-mål i cm	Lengde cm	Art.no Venstre	Art.no Høyre	
S	13-16	20	40321-10-40	40321-20-40	
M	16-18	20	40321-10-50	40321-20-50	
L	18-20	20	40321-10-60	40321-20-60	
XL	20-23	20	40321-10-70	40321-20-70	



MD Class I CE