

# StomiSoft - Støttebelte

ART.NO 50218, 50219

StomiSoft er et rett, elastisk støttebelte for bruk ved stomi eller stomibrokk. Beltet har en uelastisk front. Enkelt å feste og justere takket være håndtak og borrelås i fronten. Borrelåsen festes over hele den uelastiske fronten, og derfor har støttebeltet en fleksibel størrelse/omkrets og kan strammes eller slakkes.

Det kan klippes hull i det uelastiske frontpartiet. Klipp hull i ønsket størrelse i forhold til stomibandasjen. Frontpartiet frynser ikke uansett form og størrelse på hullet. Ikke nødvendig med søm. Beltet kan brukes like godt med eller uten klippet hull. Dersom man vil ha stomiposen strammere, lukkes støttebeltet slik at posen ligger under det uelastiske materialet. For at stomiposen enkelt skal kunne ekspanderes, kan beltet snus slik at posen isteden ligger under det elastiske materialet.

Beltet kan snus, slik at det passer både på høyre og venstre side ved stomi. StomiSoft er tilgjengelig i sort. Høyde 16 og 20 cm.

**Indikasjoner:** Stabiliserende belte for stomi/lettere typer stomibrokk. Forebyggende mot brokk. Mage/torso belte for mobilisering etter abdominal operasjon. Brukes over stomipose eller med hull til stomipose. Egnert som permanent belte.


**Kontraindikasjoner:** Inneklemt brokk/klemt brokk.

**Materiale:** Polyester 49%, Polyamid 29%, Polyuretan 11%, Elastan 11%. Lateksfri.


**Vaskeråd:** Maskinvask ved 40°C. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

**Størrelse og mål:** Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt plassering. Følg måletabellen for å finne rett størrelse.


Størrelse	Mål cm	Høyde 16 cm Art.no	Høyde 20 cm Art.no
XS	70-85	50219-00-30	50218-00-30
S	80-95	50219-00-40	50218-00-40
M	90-105	50219-00-50	50218-00-50
L	100-115	50219-00-60	50218-00-60
XL	110-125	50219-00-70	50218-00-70
2XL	120-135	50219-00-80	50218-00-80

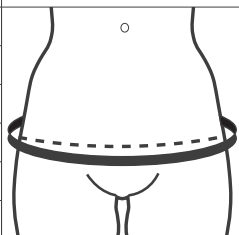


Håndtak for enkel på- & avtagning.

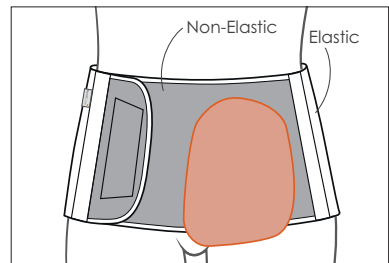

Med klippet hull til stomibandasjen.

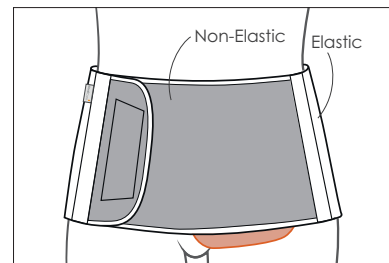

Med mer press, uelastisk støtte/support over stomibandasjen.

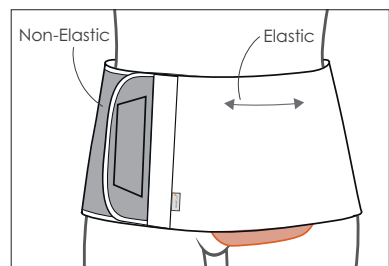

Med myk elastisk støtte/support over stomibandasjen.

