

# Stride Duo - OA Kneortose

ART.NO 70656

Stride Duo har doble skinner for økt stabilitet til kneet. Brukes til smertelindring og for å lette og forbedre funksjon ved kneartrose. Ortosen har den unike evnen til å vinkle skinnen med den medfølgende nøkkelen og kan stilles inn for medial eller lateral avlastning. Bevegelsesområdet kan stilles inn i ekstensjon 0°, 5° 10°, 15°, 20° og 25° og fleksjon 45°, 60°, 75° og 90°. Den fremre leggmansjetten gjør det enkelt å påføre og fjerne og er buet for å passe komfortabelt over tibia. De fleksible stroppene i lårmansjetten er lett føret for god komfort og tilpasser seg fleksibelt til lårets form og kontur gjennom hele bevegelsen.



**Indikasjoner:** Mild til alvorlig medial eller lateral kneartrose med ligamentøs ustabilitet. Funksjonell støtte for redusert medial eller lateral leddbelastning.

**Kontraindikasjoner:** Ikke beregnet for personer med vekt >110 kg.

**Størrelse:** S-2XL. Finnes for høyre og venstre kne.

**Materiale:** 38% Aluminium/Polymer resin, 32% Nylon, 10% EVA Foam/Doeskin, 6% Stainless steel, 5% Polypropylene, 3% Delrin, 3% Neoprene, 3% Polyester. Latexfri.

**Vaskeråd:** Skyll ortosen og la den lufttørke. Polstringen kan tas av og håndvaskes ved behov, skyll og lufttørk. Kontroller at borrelåsen er fri for smuss og at borrelåsen virker som den skal.


**Tilbehør\*:** Ekstra polstring & bånd kan kjøpes separat.

- Polstring til Stride Duo, venstre (S-2XL) art.no 70656-10-XX
- Polstring til Stride Duo, høyre (S-2XL) art.no 70656-20-XX
- Båndsett til Stride Duo (S-2XL) art.no 70656-30-XX



MD Class I CE

Størrelse	1. Omkrets lår cm	2. Omkrets midt-patella cm	3. Omkrets legg cm	Art.no Venstre	Art.no Høyre
S	39,5-47	28-33	31-35	70656-10-40	70656-20-40
M	47-53,5	33-37	33,5-38	70656-10-50	70656-20-50
L	53,5-59,5	37-40,5	36-40	70656-10-60	70656-20-60
XL	59,5-63,5	40,5-45	38-43	70656-10-70	70656-20-70
2XL	63,5-71	45-49	43-48	70656-10-80	70656-20-80

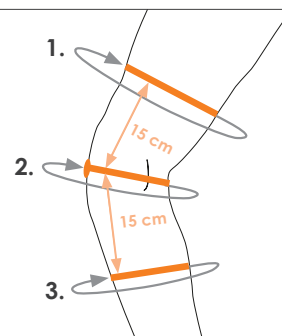

\*Bestillingsvare