

OActive - Kneortose

ART.NO 70658

OActive er en lett og komfortabel ortose med lav profil som brukes for smertelindring og for å forenkle og forbedre funksjon ved kneartrose. Ortosen har unike muligheter til å vinkle skinnen med den medfølgende nøkkelen og kan stilles inn for medial eller lateral lettelse. Bevegelsesområdet kan stilles inn for medial eller lateral lettelse. Bevegelsesområdet kan stilles inn i ekstensjon 0°, 5°, 10°, 15°, 20° & 25° og 45°, 60°, 75° & 90° fleksjon.

Ortosen har bare en skinne slik at den kontralaterale kontakt unngås i løpet av tiden. Perfekt både til pasienter med bilaterale plager og de som har begrenset mellomrom mellom lår eller knær under gange.

OActive tas på fra siden og åpnes/lukkes enkelt med fire spenner.

Støpt polstring samt polstring på drabånd med innslag av antiglid minsker risiko for glidning.

Indikasjoner: Mild til alvorlig unikompartmental kneleddsartrose. Medial eller lateral kompartment.

Kontraindikasjon: Ikke beregnet på personer med vekt >136 kg.

Størrelse: Universal.

Materiale: Skinne i aluminium, knepute i neopren. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Ortosen kan tas av og vaskes for hånd med kaldt vann og mildt vaskemiddel ved behov. Skyll grundig og lufttørk (ikke i tørketrommel).



MD Class I CE

	Art. no.
Venstre	70658-10-50
Høyre	70658-20-50
Størrelse	Universal
Passer til lår med omkrets opp til 73 cm.	