

INSTRUKTIONER FÖR 20202 CubitiROM™ - postoperativ armbågsortos



Utprovarinstruktion:

1. Öppna lås-knappen **A** (skjut uppåt) och ställ in önskat rörelseomfång:

1a. Stopp i flexionsriktning kan ställas i 0°-120°.

1b. Stopp i extensionsriktning kan ställas i 0°-90°.

1c. Stäng lås-knappen **A** (skjut nedåt) när inställningen är klar.

2. Ställ in önskad längd på skenorna.

2a. Tryck först på "Unlock" **B** och skjut skenan helt ned mot ledcentrum.

2b. Tryck sedan på "Lock" **C** och skjut skenan upp till önskat läge. **OBS!** Håll unlock/lock-knappen intryckt hela tiden när skenan skjuts uppåt eller nedåt. Markeringarna på skenan visar var respektive låsläge finns.

3. Öppna upp ortosens band och positionera den runt armen. Leden ska centreras över armbågsleden.

4. Stäng därefter kardborrelåsningen på ortosens övre band runt överarmen och sedan de nedre banden runt nedre delen av armen och handleden. Bandens längd går enkelt att justera, öppna "krokodilgapet" och klipp av banden till önskad längd.

5. Vid behov av extra avlastning kan axelremmen användas:

5a. Lägg axelremmen över axeln på den friska armen, låt änden med plasthaken **D** hänga bakom ryggen. Trä handledsbandet genom axelbandets nedre vändsölja **E** och fäst.

5b. Dra fram änden med plasthake **D** mellan arm och kropp och haka fast den i axelremmens övre vändsölja **F** på framsidan enligt bild.

5c. Justera enkelt längden på axelbandet med hjälp av axelremmens "krokodilgap" på framsidan.

5d. Klipp av axelremmen om den efter justering blir för lång.

Indikationer:

Används för post-operativ eller post-traumatisk stabilisering. Muskel/ligamentskador. Distal humerusfraktur. Armbågsplastik. Stabil armbågsfraktur.

Material:

Skenor i aluminium. Polstring i polyester/bomull, velcro.

Information om förskrivning:

Förskrivning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av medicinskt utbildad person. Utprovning bör göras av/under ledning av ortopedingenjör/tekniker eller annan sjukvårdspersonal. För bästa resultat, följ användningsinstruktionerna. Kontrollera att kardborrbanden är fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmiddel.

Användarinformation och skötsel:

Använd enbart armbågsortosen enligt de föreskrifter som läkare/utprovare angett. Särskild uppmärksamhet bör iakttagas om ortosen används till barn. Om produkten används till barn, skall produkt samt anpassning av denna regelbundet kontrolleras av vuxen person. Detsamma gäller om produkten används av person som ej, p.g.a. fysisk/mental hälsa, själv kan kontrollera detta.

Läs alltid noggrant samtliga instruktioner innan produkten tas i bruk. Vid minsta tveksamhet, kontakta din läkare/utprovare. Det är viktigt att generella samt individuella användarinstruktioner från läkare/utprovare följs under hela rehabiliteringstiden. Speciellt gäller det inställningen av ortosens flexionsstopp och extensionsstopp. Ändra aldrig inställningen utan läkares/utprovares inrådan. Låsknappen på leden ska alltid vara stängd när ortosen används.

Kontakta alltid läkare/utprovare ifall frågor uppkommer eller om biverkningar uppstår. Kontakta läkare/utprovare om hudirritation uppstår. Undvik att använda hudkräm för att minska påverkan på bandaget. Vid inställning av leden är det mycket viktigt att armen inte samtidigt belastas, detta för att undvika olyckor. Använd inte armbågsortosen vid bad/dusch.

Tvätttråd:



Skenor/led torkas av med tvål/vatten alternativt spritas av. Textila delar vattentvätt 60° grader.



Denna produkt följer medicintekniska direktivet 93/42/EEC. Medicinteknisk produkt klass 1, icke steril.

info@nordicare.se
+46 42 35 22 20


NordicCare®

 NordiCare Ortopedi & Rehab
Solrosvägen 1, SE-263 62 Viken,
Sweden. www.nordicare.se
 Made in China